

Protect Your Patient

By checking medical equipment before use !



Check ความสมบูรณ์ของหีบห่อ
(ไม่มีรอยขาด รั่ว มีรู เปียกชื้น
หรือร่องรอยการเปิดใช้)



Check วันหมดอายุก่อนการใช้งาน



Check ตัวบ่งชี้การทำให้ปราศจากเชื้อ

(External Indicator)

Before Sterilization



After Sterilization



(Internal Indicator)

Before Sterilization



After Sterilization



ถ้าการตรวจสอบทั้งหมดผ่านเกณฑ์
อุปกรณ์ชิ้นนี้ พร้อมสำหรับการใช้งาน



หากพบความผิดปกติใด ๆ **ห้ามใช้งาน** และแจ้ง
ผู้รับผิดชอบทันที "โทร: 5068, 5069
(แผนก CSSD)



ทุกครั้งที่เราตรวจเช็ค
คือการ
ปกป้องชีวิตของผู้ป่วย

การปฏิบัติตามหลักการทำให้
ปราศจากเชื้อและการตรวจสอบ
ประสิทธิภาพอย่างสม่ำเสมอช่วย
ป้องกันการติดเชื้อในโรง
พยาบาลได้ถึงร้อยละ 50
(องค์การอนามัยโลก , 2559)

การตรวจสอบเพื่อยืนยัน
ความพร้อมใช้และความ
ปราศจากเชื้อของอุปกรณ์
ก่อนการผ่าตัดช่วยลดอัตรา
การเกิดภาวะแทรกซ้อนหลัง
ผ่าตัดได้ถึงร้อยละ 15
(Adeniran et al, 2017)

ตรวจสอบอุปกรณ์การแพทย์ทุกครั้งก่อนใช้กับผู้ป่วยเพื่อ ป้องกันการติดเชื้อ
สร้าง ความปลอดภัย ในการรักษา



You've helped protect
patients



Naresuan University Hospital



Central Sterile Supply Department



055-965068, 055-965069